

**NOME DO PRODUTO: ESPARADRAPO - WILTEX**

Registro MS: 10150470704

**DADOS PRODUTO REGISTRO ANVISA**

Nome técnico: Esparadrapos e Fitas Adesivas

Matéria Prima: 40% algodão, 18% poliéster, 42% adesivo médico sensível à pressão de óxido de zinco

Método de Esterilização: **N/A**

Produto Estéril: ( ) Sim (X) Não

Validade: 5 anos

**FABRICANTE RECOMENDA O USO ÚNICO****DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

O Esparadrapo Wiltex em rolo com carretel é indicado para fixação de todos os tipos de curativos, seringas, agulhas, cateteres etc.

**INDICAÇÃO DE USO**

O Esparadrapo Wiltex em rolo com carretel é indicado para fixação de todos os tipos de curativos, seringas, agulhas, cateteres etc.

**INSTRUÇÃO DE USO**

1. Selecione o tipo e tamanho de fita correta para a aplicação.
2. Corte o pelo, se necessário.
3. Aplicar a fita com a pele completamente seca.
4. Minimize o toque do adesivo.
5. Aplique a fita sem tensão à pele limpa e seca.

6. Alise a fita adesiva no lugar com pressão suave, delicada. Evite aberturas e enrugamentos.

Em geral não circule completamente um membro com a fita.

7. Esfregue o local para conseguir boa adesão.

### **ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

Esparadrapo: 40% algodão, 18% poliéster, 42% adesivo médico sensível à pressão de óxido de zinco


Suporte interno: PVC

Carretel: polipropileno

Capa do carretel: polipropileno

<b>Largura (mm)</b>	<b>Comprimento (m)</b>	<b>Cor</b>
12,5	4,5	Branco
25	4,5	Branco
50	4,5	Branco
75	4,5	Branco
100	4,5	Branco

### **FOTO**

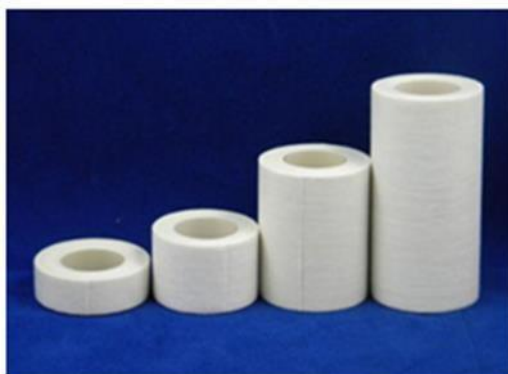



**APRESENTAÇÃO COMERCIAL**

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
ZOTBP001	ESPARADRAPO 12,5mmX4,5- WILTEX
ZOTBP002	ESPARADRAPO 25mmX4,5 - WILTEX
ZOTBP003	ESPARADRAPO 50mmX4,5 - WILTEX
ZOTBP004	ESPARADRAPO 75mmX4,5- WILTEX
ZOTBP005	ESPARADRAPO 100mmX4,5 - WILTEX

**FORMA DE APRESENTAÇÃO EMBALAGEM**

O produto é fornecido embalado unitariamente em carretéis de polipropileno com tampa em polipropileno.

**CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO**

Deve ser armazenado em ambiente cuja umidade relativa não seja superior a 80%, temperatura entre (-5 e +40) °C.

**PRECAUÇÕES/ CONTRAINDICAÇÕES**

Deve ser manuseado de acordo com o protocolo de instituição.

Fabricante recomenda o uso único.

**Importado e Distribuído por:**

Cirúrgica Fernandes Ltda

Al. África, 570, Santana de Parnaíba – SP

CNPJ: 61.418.042.0001/31 SAC 0800-771647

Site: [www.cfernandes.com.br](http://www.cfernandes.com.br)

Resp. Téc. Enfa. Lucia A. Higa – Coren SP 069259