


155.0 mm

DOBRA



ÓLEO CICATRIZANTE

curativo

DERMAEX

À base de Ácidos Graxos Essenciais (ácido oleico, ácido linoleico e ácido linolênico).

**Apresentações:** Frascos com 10, 15, 20, 25, 30, 50, 100, 120,150, 200, 250, 300, 500, 750, 1.000, 2.000 e 4.000 mL. Frasco Spray com 10, 15, 20, 25, 30, 50, 100, 120,150, 200, 250, 300 e 500 ml. Kit com 2, 3, 4 e 5 unidades da mesma apresentação.

Contém óleo de girassol (rico em ácidos graxos essenciais), triglicérides cáprico/caprílico de cadeia média, ácido láurico, vitaminas A e E, lecitina de soja e óleo de soja indicados para:

- Aplicação em pele íntegra, para prevenção de úlcera por pressão;
- Feridas agudas e crônicas, com ou sem infecção, de qualquer etiologia;
- Feridas com perda de tecido superficial e parcial;
- Dermatites peri-lesões;
- Queimaduras de primeiro e segundo grau;
- Dermatite amoniacal;
- Dermatites peri-gastrostomias, traqueostomias e drenos.

**Precauções/Advertências:** Utilizar técnica limpa ou asséptica para execução do procedimento (a escolha deve ser feita pelo profissional de acordo com características da lesão e do paciente). Evite contato com os olhos, caso aconteça enxágüe-os com água abundante. Em caso de irritação suspenda o uso. Mantenha fora do alcance de crianças. Para o uso durante a gravidez, consulte um médico. Este produto não deve ser utilizado com exposição ao sol. Conservar em local seco, fresco ao abrigo da luz. Não utilizar o produto se a embalagem estiver violada. Não utilizar este produto caso o paciente apresente hipersensibilidade a um de seus componentes. Não é recomendado o uso do produto mais que duas vezes ao dia pela possibilidade de ocasionar a hipergranulação do tecido. Em caso de hipergranulação ou hipersensibilidade suspender o uso e consultar o médico. Produto para uso externo, não deve ser ingerido. Não utilizar no bico do seio enquanto estiver amamentando. É recomendado o uso de luvas para quem manuseia o produto a fim de prevenir o risco de contaminação.

DOBRA

100.0 mm

155.0 mm

DOBRA

**Contraindicação:** Não utilizar em pacientes que possuem histórico de hipersensibilidade a algum dos componentes da formulação. Não utilizar no bico do seio enquanto estiver amamentando.

**Efeito adverso:** Não existem relatos de efeitos adversos ao utilizar o produto.

**Condições de armazenamento, conservação e/ou manipulação:** Conservar em temperatura ambiente.

**Modo de uso:** Abrir a embalagem cortando a ponta do bico aplicador.

1. Para prevenir úlceras de pressão (escaras) - Passar na pele limpa 3 a 4 vezes ao dia, principalmente nas áreas mais fáceis de aparecer as feridas – ombros (lado e atrás), região do sacro e cóccix, nas costas, lateral externa da coxa, calcanhar, joelhos (frente e laterais).

2. Para tratar úlceras de pressão (escaras), úlceras diabéticas, úlceras de perna, feridas cirúrgicas abertas e outras lesões de pele crônicas e agudas.

a) Lavar a ferida com soro fisiológico ou água corrente, sem esfregar;

b) Secar somente em volta da lesão, nunca esfregar o meio da ferida para não destruir o tecido novo que seu corpo já está formando;

c) Aplicar Óleo Cicatrizante Curativo na ferida, cobrir com uma gaze e embeber esta gaze com mais óleo. Aplicar gazes em cima daquela úmida e fechar com adesivo (micropore ou esparadrapo) ou atadura.

Importante - Faça o curativo 1 ou no máximo 2 vezes por dia. A troca frequente do curativo reduz a temperatura no local da ferida, o que pode acarretar na hipergranulação do tecido que retarda o processo de cicatrização e pode levar até mesmo ao desenvolvimento de uma ferida complexa. Se você ainda tem dúvidas, procure um profissional capacitado (médico ou enfermeira) que possa lhe dar maiores informações sobre o tratamento. A substituição do curativo é recomendada de 12 a 24 horas.

O Óleo Cicatrizante Curativo pode ser removido com água morna e sabão neutro.

**Fabricante:** Nutriex Importação e Exportação de Produtos Nutricionais e Farmoquímicos Ltda. Rua 5 c/ Rua 6 c/ Rua 4 c/ Rua 7, Quadra Área Especial 01, Lote C, Galpão 02, Setor Araguaia, Aparecida de Goiânia, Goiás, Brasil. CEP: 74.981-070. CNPJ: 06.172.459/0001-59. Registro ANVISA/MS n.º.: 80451960191. Responsável Técnico: Talita Ribeiro Santos CRF-GO 7066.

**Local de Fabricação:** Nutriex Indústria de Nutracêuticos Ltda. Avenida Brasil, nº 505, Quadra Área, Lote 01, Galpão 02, Jardim da Luz, Goiânia, Goiás, Brasil. CEP 74.850-545. CNPJ: 22.966.065/0001-29.

**SAC:** 0800 642 5858 | sac@nutriex.com.br | Indústria Brasileira

DOBRA

100.0 mm

0658716 - BULA DERMAEX CORRELATO



PRODUTOS

contato:  
62 3272 8998  
criativos@nutriex.com.br



Embalagem: ☒ primária ☐ secundária ☐ terciária

Tipo: ----- Material: -----

Tamanho: 100 x 155 mm

Acabento especial: -----

Planta: ☒ existente ☐ fornecedor ☐ apenas marcação

ATENÇÃO

- A verificação da planta técnica é de RESPONSABILIDADE do fornecedor/gráfica.
- Favor retornar layout em JPG para aprovação via email, com todas as especificações de medidas e cores.
- Para casos de primeira tiragem, enviar prova de impressão para aprovação. Sugerimos também o acompanhamento do material por um profissional da nossa equipe.

Obs.:  
- layer separada